



USER MANUAL



WE HAVE YOU COVERED

Our passionate team brings you innovative, quality mobility solutions. Our products are reliable, sleek, and designed with simplicity so that you can rest assured that they work when you need them.

Thanks to our out of the box thinking, we are vigilant to meet your mobility needs with our simple and practical solutions. We recognize the important role that safety plays in consumer choices and are proud to offer a line of products that maintain the safety features found in your vehicle. Backed by third party verification for compliance to applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards and Canadian Motor Vehicle Safety Standards, our products are engineered for safety and durability.

Our commitment to quality and safety along with our genuine desire to meet your mobility needs makes for a product we are sure you will be proud to own.





HI-LIFT

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Charger votre fauteuil roulant

Le **HI-LIFT** est un élévateur pour fauteuil roulant optionnel conçu pour lever un fauteuil manuel rigide ou pliant dans votre fourgonnette via la porte coulissante.

Veillez suivre les étapes suivantes:

- Une fois que vous avez transféré de votre fauteuil roulant, ouvrez la porte coulissante de votre fourgonnette pour accéder à votre **HI-LIFT**. Récupérez la télécommande.
- Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers l'extérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le **HI-LIFT** soit complètement sorti de votre véhicule.
- Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le bas et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la sangle du **HI-LIFT** soit suffisamment descendue pour atteindre le siège de votre fauteuil roulant. Retirez votre coussin et accrochez la sangle à la boucle qui a été installée sous le coussin de votre fauteuil roulant.



MANUEL DE L'UTILISATEUR (SUITE)

Charger votre fauteuil roulant

- Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le haut et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre fauteuil roulant soit suffisamment haut pour entrer dans le véhicule. Lorsque vous relâchez le bouton, le **H-LIFT** s'arrête de bouger. Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers l'intérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre fauteuil roulant soit complètement à l'intérieur du véhicule. Pour que ce mouvement se déroule en douceur, nous vous suggérons fortement de garder la main sur votre fauteuil roulant (comme illustré ci-dessous) pour aider à guider la chaise en place. Cela empêchera également votre fauteuil roulant de glisser d'un côté à l'autre. Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le bas et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre fauteuil roulant touche le sol à l'intérieur de votre véhicule. Nous vous suggérons de fixer votre fauteuil roulant en place.
- Rangez la télécommande et fermez la porte coulissante du véhicule.

ATTENTION

LORSQUE VOUS UTILISEZ LE **H-LIFT**, TOUJOURS GARDER UNE MAIN SUR LE FAUTEUIL ROULANT POUR ÉVITER QU'IL GLISSE D'UN CÔTÉ À L'AUTRE.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Décharger votre fauteuil roulant

Veillez suivre les étapes suivantes:

- Ouvrez la porte coulissante et récupérez la télécommande.
- Une fois le fauteuil roulant libéré, appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le haut et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil roulant soit suffisamment soulevé du plancher pour dégager le seuil de porte. Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers l'extérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre fauteuil soit complètement sorti de votre véhicule. Pour que ce mouvement se déroule en douceur, nous vous suggérons fortement de garder une main sur votre fauteuil roulant (comme sur la photo ci-dessous) pour aider à guider la chaise hors du véhicule. Cela empêchera également votre fauteuil roulant de glisser d'un côté à l'autre. Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le bas et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre fauteuil roulant soit complètement rendu au sol.
- Décrochez la sangle du **H-LIFT** de votre fauteuil roulant. Appuyez et maintenez le bouton avec la flèche pointant vers le haut jusqu'à ce que la sangle du **H-LIFT** soit complètement rangée. Ensuite, appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers l'intérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le **H-LIFT** ait pivoté dans le véhicule. Remplacez la télécommande et fermez la porte coulissante.





GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS HI-LIFT

Adapt-Solutions # 1 Ltée. (Adapt Solutions), garantit à l'acheteur original du **HI-LIFT** que l'équipement est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat.

Au cours de la première année de la garantie, Adapt Solutions fournira les pièces de rechange ainsi qu'un montant préétabli (déterminé par Adapt Solutions) pour la réparation si un défaut de matériel ou de fabrication était découvert. Après la première année de cette garantie, seules les pièces et les composantes seront couvertes. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre et d'autres services après la première année. Les frais d'expédition et autres frais de réparation connexes seront à la charge de l'acheteur initial.

La solution à un défaut de l'un des produits d'Adapt Solutions (**LINK; XL-BASE; XL-SEAT; ASENT0; HI-LIFT; SPEEDY-LIFT; XL-BOARD; POWER-PULL**) sera la réparation ou le remplacement de la pièce ou composante défectueuse, à la discrétion d'Adapt Solutions. Si la réparation ou le remplacement ne sont pas possibles ou ne peuvent pas être faits rapidement, Adapt Solutions peut décider de rembourser le prix d'achat de l'équipement au lieu de réparer ou de remplacer l'équipement d'origine.

Adapt Solutions n'est en aucun cas, responsable des dommages indirects, accidentels ou consécutifs, que ces dommages découlent de réclamations fondées sur un contrat, une garantie, un délit civil (y compris la négligence), la responsabilité stricte ou la responsabilité des produits.

Toutes les garanties implicites, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées dans leur durée, à la durée de la garantie indiquée ci-dessus pour la composante concernée.

Cette garantie est non transférable et exclut tout dommage dû à une erreur d'installation, un mauvais usage, l'abus du produit, les accidents, les dommages physiques, des dommages lors de l'expédition, les modifications non effectuées par Adapt Solutions, ou les réparations effectuées par une personne autre que les distributeurs autorisés.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE GARANTIE OU REMBOURSEMENT

Suivez les procédures:

1. Obtenez l'autorisation de garantie en appelant votre distributeur autorisé ou directement Adapt Solutions à 1-866-641-0419.
2. Envoyez, port payé, les pièces/composantes/équipements à l'adresse fournie par votre distributeur autorisé ou à Adapt Solutions avec une preuve d'achat indiquant la date d'achat.

Si un défaut de matériel ou de fabrication est découvert, Adapt Solutions payera les frais d'expédition à l'acheteur se situant au Canada et aux États-Unis. Les frais de retour et de réparation seront la responsabilité de l'acheteur si le problème n'est pas couvert par la garantie.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Adapt Solutions n'autorise personne à prolonger la durée ou la portée de cette garantie.

Pour de plus amples informations concernant cette garantie limitée, veuillez nous contacter en composant le 1-866-641-0419 ou par écrit à l'adresse suivante :

Adapt Solutions / Département de garantie
145 Damase-Breton
St-Lambert-de-Lauzon, Québec
G0S 2W0 Canada

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Adapt Solutions # 1 Ltée., situé à St-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada, garantit que ce produit est exempt de défaut de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. Pour que la garantie soit valide, ce produit doit être installé par un distributeur autorisé et être utilisé correctement par son propriétaire. La garantie est non transférable et ne couvre aucun défaut sur le véhicule. Vous devez compléter la carte d'enregistrement et la retourner dans les 30 jours suivant l'achat. Cette garantie sera nulle et sans effet si le produit a été endommagé par un accident, un mauvais usage, par négligence ou si le produit a été modifié de quelque façon. Les pièces défectueuses doivent être retournées par un distributeur autorisé qui aura, au préalable, obtenu l'accord d'Adapt Solutions # 1 Ltée. Les pièces garanties seront alors retournées au frais de l'acquéreur. Après inspection, Adapt Solutions # 1 Ltée se réserve le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

Date installée: _____

Distributeur autorisé: _____

Signature: _____

À CONSERVER POUR VOS DOSSIERS

(Placez le numéro de série ici)

WE ARE THE SOLUTION

Please contact your dealer for immediate assistance

Dealer:

TF 1.866.641.0419 | tech@adaptsolutions.com



145 Damase-Breton | Saint-Lambert, Qc G0S 2W0

TF 1.866.641.0419 | Fax 418.889.9838 | P 418.889.0419

www.adaptsolutions.com

